

**DIRECTIONS FOR USE OF
THE EARLOOP MEDICAL MASK**

Mode d'emploi du masque médical à élastiques


For having the best level of comfort, safety and performance, please follow the instruction printed on the primary packaging, as follow:

Pour avoir le meilleur niveau de confort, de sécurité et de performance, veuillez suivre les instructions imprimées sur l'emballage primaires, comme suit :

Instructions for use / Mode d'emploi


1- Fully unfold a mask by placing the coloured layer on the outside of the mask.

1- Dépliez le masque et tenez-le dans les mains en positionnant la face colorée à l'extérieur.

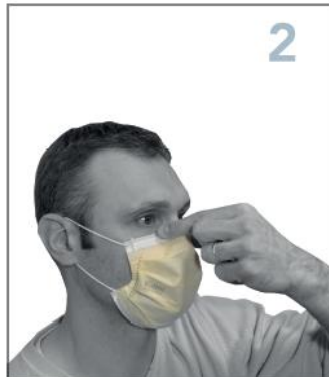

2- Place the mask on your face by pulling the earloops around your ears. Secure the nosepiece comfortably over the bridge of a nose.

2- Passez les boucles élastiquées derrière les oreilles, positionnez le masque sur votre visage, et pincez la barrette nasale sur l'arête du nez. Vérifiez son ajustement.

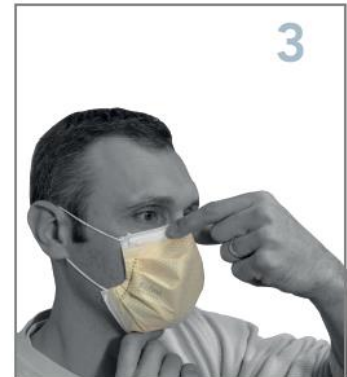

3- Pull the mask down under the chin.

3- Déployez le masque vers le bas du visage jusque sous le menton.

Name : **Carine CHEVALLIER**

Date : 02.02.2017 (v1)

Signature :

Function : RA Manager